


**SHPHARMA**  
source of healing

сайт производителя  
**shpharma.ru**

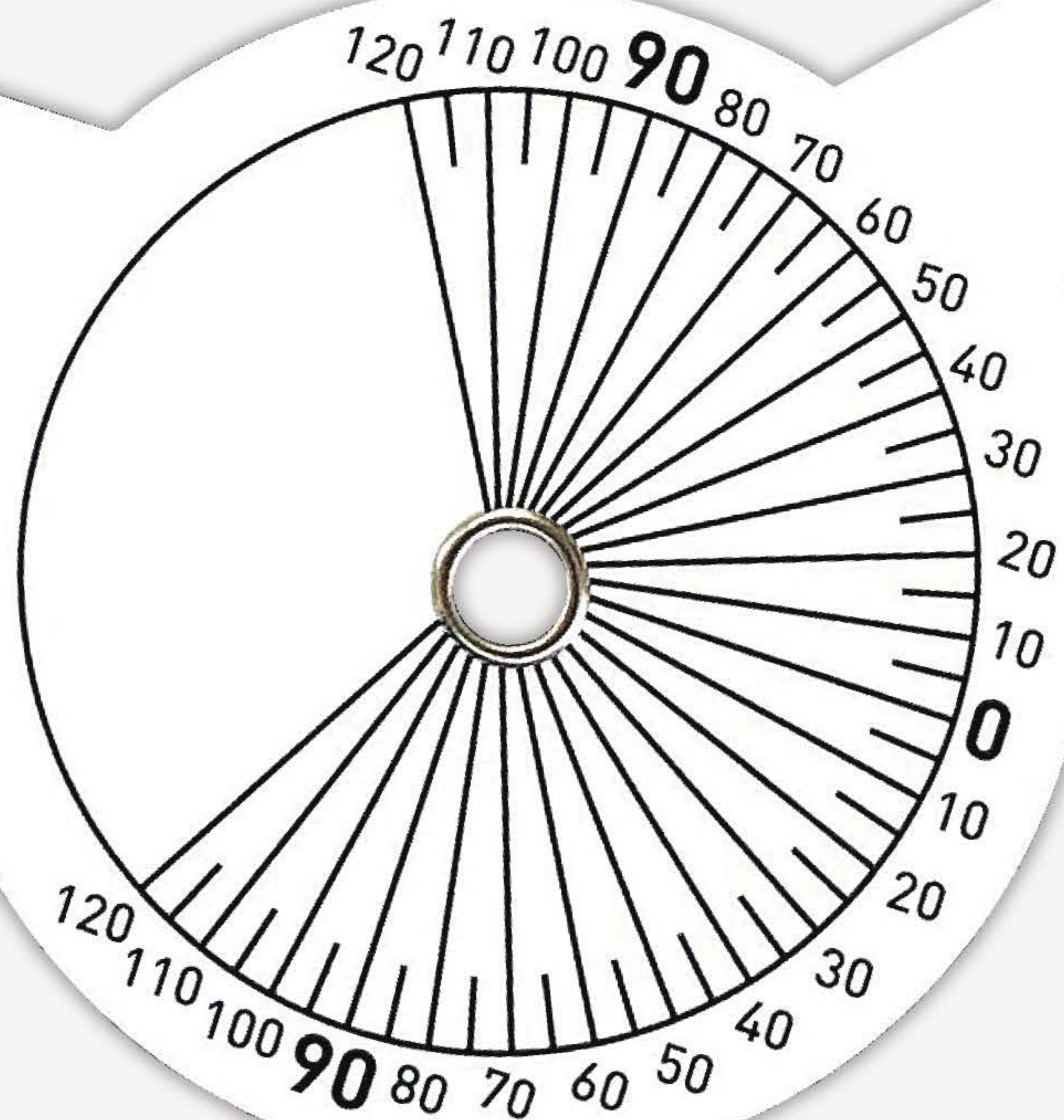

# ПЕЙРОФЛЕКС

Первое современное средство для борьбы с болезнью Пейрони  
**peyroflex.ru**

## ЛИНЕЙКА ПЕЙРОФЛЕКС - УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КРИВИЗНЫ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ПРИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ

Данное простое в использовании одноразовое устройство было разработано для объективной оценки деформации полового члена при болезни Пейрони.



**Помогает пациенту лучше понять свой диагноз.** Объективно измеряет степень кривизны, а не полагается на фотографии или кривые, о которых сообщают пациенты, которые могут быть неточными.

**Официальное документирование искривления полового члена.** Делает диагноз болезни Пейрони более объективным.

**Мониторинг лечения болезни Пейрони.** Пациенты, которые выбирают нехирургическое лечение, могут контролировать успешность терапии с помощью регулярной оценки кривизны, используя данное устройство в домашних условиях, а врачи могут отслеживать эффект терапии в кабинете, выполняя повторную оценку кривизны после фармакологической индукции эрекции (с ультразвуком полового члена или без него).

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИНЕЙКИ ПЕЙРОНИ

**ПОЛОВОЙ ЧЛЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ В МАКСИМАЛЬНО ЭРЕГИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ ДО НАЧАЛА ИЗМЕРЕНИЙ.**


1

Установите короткое плечо устройства параллельно части члена, которая расположена ближе к лобку.



2

Затем вращайте длинное плечо устройства, пока вырезка на ней не выровняется с серединой ствола полового члена над искривленной частью.

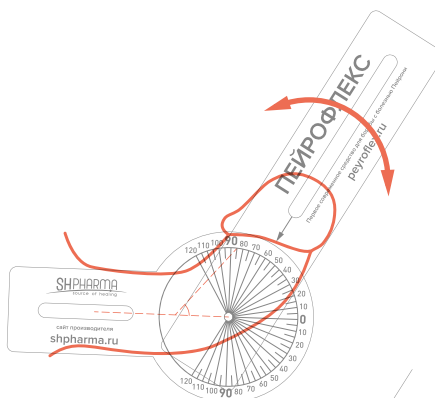

3

Осторожно отдалите устройство от полового члена и прочитайте угол кривизны, указанный на промаркированной центральной части рядом со стрелкой. Запишите значение и убедитесь, что каждое последующее измерение всегда выполняется при максимально эрегированном состоянии полового члена.

